

Описание продукта

OpalDam™ и OpalDam™ Green — это уникальные, светоотражающие, пассивно адгезивные (герметизирующие) светоотверждаемые смолы. Их метакрилатная основа разработана с достаточной прочностью чтобы поддерживать барьер, но легко удаляется из углублений и поднутрений. Контрастный зеленый цвет OpalDam Green показывает его расположение на Десне и зубах для более эффективного покрытия. Перед использованием внимательно прочитайте и уясните инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.

Форма поставки

- Шприцы объемом 1,2 мл
- Насадки-дозаторы:
 - Насадка Micro 20-ого калибра
 - Черная насадка Mini™

Показания к использованию / Назначение

OpalDam и OpalDam Зеленый — это уникальные, светоотражающие, пассивно-адгезивные (изолирующие) светоотверждаемые композитные смолы. Их метакрилатная основа обладает достаточной силой для образования барьера, и в то же самое время она легко удаляется из межзубных промежутков и надрезов. Контрастный зеленый цвет OpalDam Зеленый делает ее видимой на деснах и зубах, что обеспечивает более эффективное покрытие.

Противопоказания

Не используйте для OpalDam/OpalDam Green пациентов с известной чувствительностью к метакрилатам или другим смолам. Если речь идет о пациентах или пользователях, страдающих аллергией, см. документ о наличии аллергенов в продукте на сайте www.ultradent.com. В случае развития аллергической реакции тщательно промойте водой пораженный участок и обратитесь к врачу.

Особые указания и меры предосторожности

- 1) Смолы могут быть сенсибилизирующими. При появлении дерматита, сыпи или любой другой аллергической реакции промойте пораженный участок большим количеством воды и направьте пациента к врачу.
- 2) При использовании полимерного барьера OpalDam изолируйте пациентов с тяжелым мукозитом или субэпидермальным аутоиммунным заболеванием, проявляющимся в полости рта. Вместо полимерного барьера используйте раббердаме.
- 3) Если на десневом краю полимерного барьера OpalDam/OpalDam Green появляются пузырьки, повторно нанесите на эту область.
- 4) Во избежание перекрестного загрязнения в перерывах между процедурами протирайте шприц средством для дезинфекции среднего уровня и используйте одноразовую барьерную защиту. В случае если барьерная защита не используется, шприц следует считать одноразовым.
- 5) Наконечники предназначены только для одноразового использования.
- 6) При отверждении смол на мягких тканях используйте сканирующее движение, чтобы предотвратить тепловое раздражение от отверждения светом.

Пошаговые инструкции:

Подготовка

- 1) Снимите колпачок Люэра и надежно закрепите рекомендуемый наконечник на шприце с полимерным барьером OpalDam/OpalDam Green.
- 2) Перед Внесением вполость рта проверьте поток. Если ощущается сопротивление, замените Насадку и произведите повторную проверку.
- 3) Полностью промойте и высушите зубы и десну, на которые будет наноситься полимерный барьер OpalDam/OpalDam Green.

Применение

- 1) Выдавите полимерный барьер OpalDam/OpalDam Green высотой примерно 5–10 мм с перекрытием примерно 2-3 мм участка эмали. Нанесите смолу за пределы последнего обрабатываемого зуба и на открытые Поднутрения, чтобы защитить межзубные сосочки и язычную десневую ткань. Порции барьера, проходящие через десневые Поднутрения, усиливают ретенцию полимерного барьера OpalDam/OpalDam Green.
- 2) При защите Всего зубного ряда фотополимерируйте полимерный барьер в стандартном режиме, используя сканирующее движение в течение 20 секунд и удерживая линзу на расстоянии примерно 1 см от барьера и ткани. С помощью стоматологического инструмента тщательно проверьте смолу на полное отверждение. Если не используется на полной дуге, сканируйте барьер в течение примерно 3–5 секунд на каждый зуб.

Очистка

- 1) После лечения снимите полимерный барьер OpalDam/OpalDam Green с поверхности, аккуратно Подцепив инструментом край барьера в пространство между десной и барьером. Все или большие куски оторвутся одновременно.
- 2) Удалите полимерный барьер OpalDam/OpalDam Green в межзубных промежутках с помощью зонда и/или флосса. Тщательно промойте рот.

Обработка

Во избежание перекрестного загрязнения в перерывах между процедурами протирайте шприц средством для дезинфекции среднего уровня и используйте одноразовую барьерную защиту. В случае если барьерная защита не используется, шприц следует считать одноразовым.

Хранение и утилизация


Хранить в соответствии с этикеткой на внешней упаковке. Утилизируйте отходы в соответствии с местными нормами, инструкциями и нормативами.

Различная информация

Сообщайте производителю и компетентному органу о любом серьезном происшествии.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200



Item	CE Information
Black Mini™ Tip	CE
Micro 20 ga Tip	CE

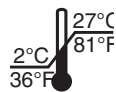

Только для профессионального использования



Импортер



Медицинское Изделие