


Enamelast™ Fluoride Varnish

5%-й фторлак

RU

RxOnly

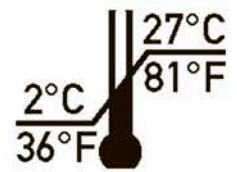

Описание продукта

Enamelast™ представляет собой ароматизированный, подслащенный ксилитом, 5% фторид натрия в полимерном носителе, поставляемый в шприце на 1,2 мл или в блистерной упаковке разовой дозы на 0,4 мл.

Для всех описанных продуктов перед использованием внимательно прочтите и усвойте все инструкции и паспорт безопасности.

Форма поставки

- Шприц для доставки объемом 1,2 мл
 - Наконечник SoftEZ™
- разовая упаковка на 0,4 мл
 - Кисть для нанесения

Показания к применению/назначение

Фторлак Enamelast представляет собой 5% фторид натрия в лаковом носителе, который вызывает механическую окклюзию дентинных канальцев при лечении гиперчувствительности зубов.

Противопоказания.

- Не используйте для лечения пациентов с язвенным гингивитом или стоматитом.
- Не используйте средство для лечения пациентов с известной повышенной чувствительностью к ингредиентам, в том числе к канифоли (kolophonium). При появлении аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
- Для пациентов или пользователей с аллергией см. документ о присутствующих в продукте аллергенах, доступный на веб-сайте www.ultradent.com. При возникновении аллергической реакции тщательно промойте область вмешательства водой и попросите пациента проконсультироваться с его лечащим врачом.

Предупреждения и меры предосторожности

- Используйте только рекомендованные наконечники.
- Насадки предназначены только для одноразового использования.
- Пациент, медработник и его ассистент должны носить защитные очки.
- В редких случаях сообщалось об отежной припухлости после применения фторидирующего лака на обширном участке, а также о затруднении дыхания у детей, страдающих астмой. В этом случае тщательно почистите зубы, чтобы удалить пленку лака, и попросите пациента связаться со своим лечащим врачом.
- Некоторые пациенты могут испытывать тошноту после применения средства. Если тошнота не проходит, следует тщательно почистить зубы для удаления пленки лака.
- Не используйте более половины шприца 1,2 мл фторлака на пациента за одно применение.
- Не проводите лечение с помощью других наружных средств для фторирования зубов в тот же день и предупредите пациента о необходимости воздерживаться от применения фторсодержащих средств в ротовой полости в течение 4 (четырёх) дней после лечения.
- Не снимайте колпачок со шприца или крышку из фольги с разовой дозы, пока не будете готовы к использованию.

Пошаговые инструкции

Подготовка

- 1) Тщательно почистите зубы, отполируйте резиновой чашечкой или протрите зубы марлей перед установкой.
- 2) Для шприца:
 - a. Надежно прикрепите рекомендуемый наконечник для доставки и проверьте текучесть, цвет и консистенцию продукта перед нанесением, выдавив небольшое количество на бумагу для замешивания или марлю. Если выдавится прозрачная жидкость, уберите ее. При чрезмерном сопротивлении замените наконечник и повторите проверку.
- 3) Для разовой дозы:
 - a. Откройте блистерную упаковку, отогнув и сняв крышку из фольги. Используйте одноразовую кисточку для нанесения, слегка перемешайте лак.

Использование

- 1) Сухой участок, подлежащий обработке.
- 2) Нанесите тонкий ровный слой фторлака Enamelast на как можно большее количество поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Пациентам следует избегать чистки зубов щеткой и зубной нитью в течение 4–6 часов после лечения. Если есть возможность, подождите до следующего утра.
- Пациентам следует избегать горячей пищи или напитков, а также продуктов, содержащих алкоголь (например, напитки, средства для полоскания рта и т. д.) в течение 4–6 часов после лечения.
- Фторлак Enamelast начнет отслаиваться при каждой чистке щеткой.
- Для максимального эффекта лак Enamelast можно наносить повторно каждые 3–6 месяцев.

Надлежащее обращение

Во избежание перекрестного загрязнения протирайте шприц между применениями дезинфицирующим средством средней активности и используйте одноразовые защитные чехлы. Если защитный чехол не используется, шприц следует рассматривать как одноразовый.

Хранение и утилизация

Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.

Прочая информация

Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

RU - Только для профессионального использования

Покрывание дентальное для уменьшения чувствительности зубов **Энаместа® 5% Содиум Флюорид Варниш Унидозы Кит** 1 шт. по 0,4 мл.

Производитель: Ультрадент Продактс Инк.,
505 Вест 10200 Саус, Саус Джордан, Юта 84095,
США. Поставщик в России: ООО «Эс.Ти.Ай.дент»,
123182, Москва, ул. Щукинская, 2,
офис 180, www.stident.ru
РУ № РЗН 2019/8238 от 26.03.2019

Enamelast™ Fluoride Varnish

5% Sodium Fluoride Varnish



Manufactured by:
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Manufactured in the USA from globally sourced materials



Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Cologne Germany

Australian Sponsor:
Ultradent Australia Pty Ltd
16/1 Market St. Sydney, NSW 2000
1800 29 09 29 | www.ultradent.com.au

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

800.552.5512 | ultradent.com
© 2022 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 1004338AR03 060722

CE 0044