

Светоотверждаемый материал Calcium Hydroxide/Cavity Liner

Рентгеноконтрастный светоотверждаемый материал

Описание продукта

Светоотверждаемый материал Cavity Liner — это однокомпонентный светоотверждаемый рентгеноконтрастный материал, содержащий гидроксид кальция.

Области применения

– Непрямое покрытие пульпы.

– В качестве подкладки под все реставрационные материалы.

Применение

Во время нанесения убедитесь, что поверхности зуба идеально сухие, и избегайте загрязнения. Вместо светоотверждаемого материала Cavity Liner

используйте водный раствор гидроксида кальция на дентине вблизи пульпы (< 0,5 мм) и для прямого покрытия пульпы.

Светоотверждаемый материал Cavity Liner можно наносить непосредственно из шприца.

Прокладки толщиной более 1 мм необходимо наращивать послойно, и каждый слой полимеризовать не менее 20 секунд.

Если требуется повышенная адгезия (например, при использовании светоотверждаемого материала Cavity Liner для адгезивных реставрационных процедур),

перед нанесением светоотверждаемого материала Cavity Liner можно использовать подходящий адгезив. Для этого следуйте инструкциям производителя адгезива по применению.

Перед полимеризацией тщательно удалите излишки материала с помощью надлежащих инструментов.

Не удаляйте полимеризованные излишки материала зондом, вместо этого аккуратно используйте вращающийся инструмент, а затем выполните реставрацию в соответствии с инструкциями производителя.

Информация, меры предосторожности

Не используйте светоотверждаемый Cavity Liner на краях реставрации. В краевой области постоянная реставрация всегда должна устанавливаться на здоровую,

неповрежденную кариесом твердую ткань зуба, которая при использовании адгезивной техники должна быть соответствующим образом подготовлена.

Светоотверждаемый Cavity Liner прилипает к материалам на метакрилатной основе, например, к материалам для коронок и мостовидных протезов, временным герметизирующим материалам и некоторым оттискным материалам (например, полиэфир), что может привести к отслоению подложки полости.

В таких случаях рекомендуется применение разделительного агента (например, вазелина, глицеринового геля и т. д.).

Удалите изолирующий материал перед установкой окончательной реставрации.

После нанесения светоотверждаемый состав Cavity Liner нельзя подвергать прямому воздействию света (рабочего света, солнечного света) и его необходимо наносить как можно быстрее.

Светоотверждаемый состав Cavity Liner содержит метакрилаты, ВНТ (бутилированный гидрокситолуол) и амины.

Cavity Liner не следует использовать при известной гиперчувствительности (аллергии) к любому из этих компонентов.

Гидроксид кальция оказывает едкое действие на кожу и слизистые оболочки, избегайте попадания в глаза!

Фенольные вещества, особенно продукты, содержащие эвгенол и тимол, препятствуют отверждению светоотверждаемого состава Cavity Liner.

Поэтому следует избегать использования цемента на основе оксида цинка и эвгенола или других материалов, содержащих эвгенол, в сочетании со светоотверждаемым составом Cavity Liner.

Держите световое окно как можно ближе к поверхности реставрации, так как в противном случае отверждение может быть недостаточным.

Недостаточное отверждение может привести к потере прочности и дискомфорту пациента.

Условия хранения

Хранить при температуре от 4°C до 23°C в защищенном от света и влаги месте.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии.

Что касается применения поставляемых нами продуктов, наша устная и/или письменная информация предоставлена в меру наших знаний и без каких-либо обязательств.

Наша информация и/или рекомендации не освобождают вас от обязанности проверить поставляемые нами материалы на предмет их пригодности для предполагаемых целей применения.

Поскольку применение наших препаратов находится вне нашего контроля, пользователь несет полную ответственность за их применение.

Разумеется, мы гарантируем качество наших препаратов в соответствии с действующими стандартами и условиями, изложенными в наших общих условиях продажи и поставки.

Упаковка

2 шприца по 2 мл + 20 насадок 11036

Медицинское изделие ЕС