

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU/Русский

Пластиковые пипетки

Назначение

Устройство для введения небольших количеств жидкости в корневой канал или пульповую камеру во время эндодонтического или реставрационного лечения.

Свойства

Гибкая и полупрозрачная пластиковая пипетка для введения небольших количеств жидкости (капля за каплей).

Различные цветные кольца позволяют идентифицировать жидкость, содержащуюся в каждой пипетке, если несколько пипеток используются одновременно.

Инструкция по применению

Жидкость, которую необходимо ввести, всасывается насосной частью пипетки, предварительно накачанной вручную. Затем жидкость подается в корневой канал/пульповую камеру через выходное отверстие тонкого наконечника пипетки. Дозирование/выброс жидкости осуществляется путем создания давления на насосной части пипетки.

Совместимые растворы для введения

Компоненты пипетки обладают хорошей совместимостью с широким спектром жидкостей. Следующие жидкости прошли валидацию на безопасность использования с данной пипеткой: растворитель на основе апельсинового масла, растворитель на основе эвкалиптола, ЭДТА 17%, гипохлорит натрия до 6%, хлоргексидин 2%, дистиллированная вода.

Побочные реакции и противопоказания

Неизвестны.

Меры предосторожности и предупреждения

Пластиковая пипетка является одноразовым устройством. Не используйте ее повторно во избежание перекрестного загрязнения между разными пациентами/жидкостями или ухудшения качества продукта.

Не отсоединяйте отдельные части пипетки. Не используйте в случае протечки.

Растворитель на основе апельсинового масла и растворитель на основе эвкалиптола не следует хранить в пипетке более 10 минут.

Не стерилизуйте перед использованием. Дезинфекция перед использованием не требуется.

Хранение

Берегите от прямых солнечных лучей. Храните при комнатной температуре.

Срок годности

5 лет. Не используйте продукт после истечения срока годности.

Утилизация

Утилизируйте каждую пипетку в соответствии с местными правилами.

Описание упаковки

Коробка из 5 пластиковых пипеток 0,3 мл 11750

Коробка из 25 пластиковых пипеток 0,3 мл 11754

Коробка из 5 пластиковых пипеток 1 мл 11752

Коробка из 25 пластиковых пипеток 1 мл 11757

Для профессионального использования в стоматологии. Сделано в Швейцарии.