

Передать человеку, ответственному за стерилизацию

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР QuickSleeper®

1 Дезинфекция



Мойка-дезинфектор

1 Поместите контейнер в мойку-дезинфектор (режим дезинфекции 5 мин при 90°C)

2 Убедитесь, что на контейнере не осталось следов грязи и смазки.

Вручную с ультразвуком


1 Очистить замачиванием. Поместите контейнер в дезинфицирующий раствор, например, четвертичного аммония и на 8 минут включите ультразвук.

2 На 2 минуты замочите в дистиллированной воде и почистите щеткой с мягкой щетиной.

3 На 20 минут замочите в дистиллированной воде². Убедитесь, что на контейнере не осталось следов грязи и смазки. Промойте дистиллированной водой. Просушите контейнер с помощью нетканного полотна или сжатого воздуха. Полностью смойте дезинфицирующий раствор, чтобы снизить износ компонентов внутри контейнера при автоклавировании.

(²) дистиллированная вода предотвращает появление известкового налета, который может повредить контейнер. Гарантия на такие случаи не распространяется.

2 Смазка перед каждой стерилизацией

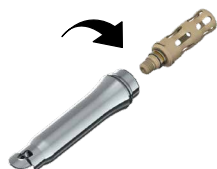

нанесите каплю
смазки на
держатель карпулы



Недостаточное кол-во смазки может значительно увеличить шум при вращении и привести к тому, что механизм вращения выйдет из строя. Гарантия на такие случаи не распространяется.

3 Стерилизация

Упакуйте в пакет для стерилизации (стандарт EN 868-5). Используйте автоклав типа В (соответствие стандарту EN 13060).

Время стерилизации: минимум 18 мин при температуре 134°C. Убедитесь, что контейнер сухой и стерильный. Храните в сухом и защищенном от пыли месте.

Передать человеку, ответственному за стерилизацию

ПЛАСТИКОВЫЙ КОНТЕЙНЕР QuickSleeper⁵



Шаги по очистке, дезинфекции, стерилизации и хранению.



Не класть в мойку-дезинфектор

Вручную с ультразвуком

- 1** Очистить замачиванием. Поместите контейнер в дезинфицирующий раствор, например, четвертичного аммония и на 8 минут включите ультразвук.
- 2** На 2 минуты замочите в дистиллированной воде и почистите щеткой с мягкой щетиной.
- 3** На 20 минут замочите в дистиллированной воде. Убедитесь, что в контейнере нет загрязнений. Промойте дистиллированной водой. Просушите контейнер с помощью нетканного полотна или сжатого воздуха.
- 4** Упакуйте в пакет для стерилизации (стандарт EN 868-5). Используйте автоклав типа В (соответствие стандарту EN 13060). Время стерилизации: минимум 18 мин при температуре 134°C
- 5** Убедитесь, что контейнер сухой и стерильный. Храните в сухом и защищенном от пыли месте.

При выполнении данных шагов обязательно соблюдайте действующие в вашей стране нормы и правила.