

ИННОВАЦИЯ
В ОБТУРАЦИИ



BioRoot™ RCS

Гораздо больше,
чем герметичное
запечатывание




4 ИННОВАЦИОННЫХ СВОЙСТВА

1 Герметичное запечатывание

Плотное соединение

- Превосходная адгезия к дентину и гуттаперчевым штифтам
- Низкий риск образования пор

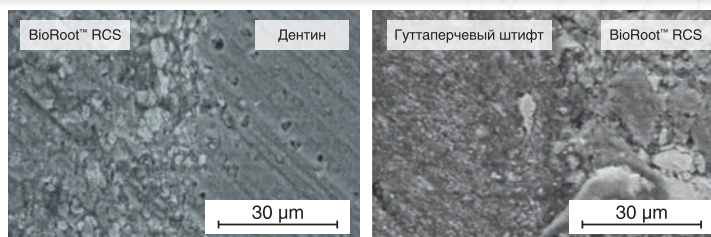

Плотное дентин/BioRoot™ RCS/гуттаперча соединение

Высокая устойчивость к микроподтеканию

- BioRoot™ RCS кристаллизуется для трёхмерной obturation
- Минерализация дентина, благодаря гидроксиапатитам
- Лучшая, чем при использовании разогретой гуттаперчи, устойчивость к микроподтеканию сразу после obturation


BioRoot™ RCS vs. «Золотой стандарт»



2 Антимикробная активность

Создаёт благоприятную щелочную среду

- Высвобождение гидроксида кальция
- pH >11
- Предотвращает рост бактерий, которые могут привести к клинической неудаче

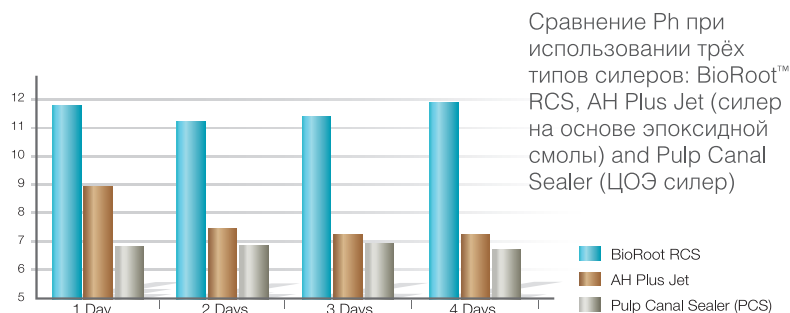

для успешной obturации

3 Заживление периапикальных очагов

Максимальная вероятность успеха

- Химически чистый неорганический состав
- Биоактивная obturация:
 - Стимулирует регенерацию костной ткани
 - Обеспечивает выздоровление периодонта

4 Простота применения и контроля


Быстро вносится

- Простота внесения в корневого канал
- Быстрое введение гуттаперчевых штифтов
- Оптимальное рабочее время и время отверждения:
 - Рабочее время: > 10 минут
 - Время отверждения: < 4 часов


Просто контролировать

- Рентгеноконтрастность, аналогичная 5мм алюминия для контроля obturации по рентгенограмме
- Возможность повторного лечения при использовании в комбинации с гуттаперчевыми штифтами


Пример клинического применения

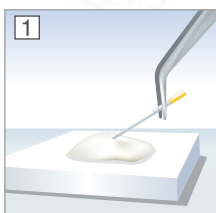


1 Возьмите смешанный BioRoot™ RCS с помощью бумажного штифта

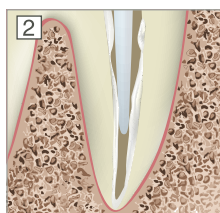

2 Заполните корневого канал BioRoot™ RCS

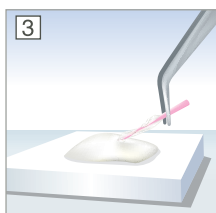

3 Нанесите на апикально адаптированный мастерштифт BioRoot™ RCS

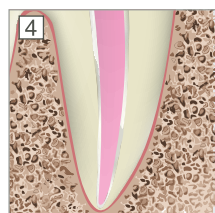

4 Аккуратно введите мастерштифт в корневого канал



5 Контрольная рентгенограмма

BioRoot™ RCS: гораздо больше, чем герметичное запечатывание

	BioRoot™ RCS	Силер на основе эпоксидной смолы	ЦОЭ силер
ПРЕВОСХОДНЫЙ ГЕРМЕТИЗМ	✓	✓	✓
ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ	✓	✓	✓
БИОАКТИВНОСТЬ	✓	✗	✗
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ PH (>11)	✓	✗	✗
ОТСУТСТВИЕ МОНОМЕРОВ В СОСТАВЕ	✓	✗	✓
СТИМУЛЯЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОКСИАПАТИТОВ	✓	✗	✗
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДЕНТИНА	✓	✗	✗
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ	✓	✓	✓

BioRoot™ RCS поставляется в удобной упаковке для ручного замешивания

- Полный контроль консистенции
- Снижен риск перекрёстной инфекции при использовании преднаполненных шприцев
- Снижен расход материала, благодаря ручной дозировке



Комплект поставки (35 применений)

- 15г. порошка
- 35 унидоз жидкости

**ACTIVE
BIOSILICATE
TECHNOLOGY**



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SEPTODONT В РОССИИ
123182, Москва, ул. Щукинская, 2, тел./факс: (495) 780-5245/46
бесплатный многоканальный телефон: 8-800-333-0646
www.stident.ru, mail@stident.ru

S.T.I.
DENT