


## Инструкции по очистке и стерилизации

RU

Первоначальное обслуживание при использовании	Стерилизация требуется перед каждым использованием.			
Подготовка перед очисткой	Протрите устройство марлей, пропитанной на 70% изопропиловым спиртом.			
Очистка	Поместите устройство в ультразвуковой очиститель, добавив одно из перечисленных ниже моющих средств:			
	Моющее средство	Время Очистки		
	Henry Schein Моющее средство общего назначения или эквивалентный продукт	2-10 мин.		
Промывание	Промойте устройство теплой водой для удаления моющего средства в течение 1-2 минут.			
Сушка	Протрите сухой тканью. Просушите воздухом в течение 30 минут.			
Техническое обслуживание, проверка и тестирование	Визуально проверьте, что устройство не согнуто, не повреждено и не содержит мусора. При наличии мусора повторите процесс очистки.			
Упаковка	Поместите выбранное устройство в утвержденную стерилизационную упаковку (ISO11407 и ISO11607).			
Стерилизация	Поместите стерилизационную упаковку в автоклав, используя следующие настройки:			
	Тип цикла	Минимальное время стерилизации	Минимальная температура стерилизации	Минимальное время сушки
	Форвакуумный цикл	3 мин.	132°C /270°F	20 мин.
	Не перегружайте стерилизатор.			
Хранение	Храните устройство в стерилизованной упаковке до следующего использования. Храните вдали от солнечного света и влаги.			
Дополнительная информация	Если стерилизационная упаковка имеет дефекты, повторите процесс стерилизации. Эта процедура была подтверждена независимой и аккредитованной лабораторией.			

Для получения печатной копии этой инструкции позвоните по телефону +1.801.553.4057

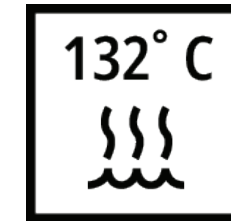

Только для профессионального использования

Импортер

Медицинское изделие

Fischer's Ultrapak™ Packer		Manufactured for: Ultradent Products, Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, Utah 84095 USA Made in USA
		EC REP Ultradent Products GmbH Am Westhoyer Berg 30 51149 Cologne Germany  Australian Sponsor: Ultradent Australia Pty Ltd P.O. Box 111 Coogee, NSW 2034 1800 29 09 29   www.ultradent.com.au
Ultradent™ Slide Packer	Rx Only	Manufactured for: Ultradent Products, Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South) South Jordan, Utah 84095 USA Made in USA

Fischer's Ultrapak™ Packer / Ultradent™ Slide Packer  
Cleaning & Sterilization Processing Instructions

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

800.552.5512 | [ultradent.com](http://ultradent.com)

© 2021 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 1008312AR04 020521