

Раствор ЭДТА 17 %

Хелатирующий агент для удаления смазанного слоя и открытия дентинных канальцев при ирригации корневого канала.

Состав

Тетранатрия эдетат (ЭДТА) 17 %, цетримония бромид 0,9 %, очищенная вода до 100 %.

Свойства

Раствор ЭДТА 17 % способствует размягчению стенок дентина корневого канала и удалению смазанного слоя при ирригации корневого канала. Механизм его действия основан на хелатировании ионов кальция и удалении неорганических остатков.

Показания

Ирригация, удаление остатков и промывание корневого канала.

Способ применения

Промойте канал раствором, например, с помощью шприца, и оставьте для воздействия на 1 минуту перед тщательным промыванием 3 % раствором гипохлорита натрия. Аспирируйте излишки жидкости, затем высушите канал.

Предостережение

Избегайте выведения раствора за пределы верхушки корня. При попеременном использовании с гипохлоритом натрия тщательно промывайте корневой канал: ЭДТА снижает концентрацию активного хлора в растворе гипохлорита.

При попадании на кожу тщательно промойте водой с мылом. При возникновении раздражения кожи обратитесь к врачу.

При попадании в глаза немедленно промойте обильным количеством воды в течение 15 минут, удерживая веко открытым, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При проглатывании прополощите рот водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Не используйте при известной аллергии на любой из компонентов продукта.

Хранение

Сразу после использования плотно закрывайте флакон. Хранить при комнатной температуре (от 15 °C до 25 °C). Защищать от света. Если продукт хранится при температуре ниже 15 °C, могут образовываться мелкие кристаллы ЭДТА. Эти кристаллы исчезнут, как только температура снова поднимется выше 15 °C.

Упаковка

1 флакон (15 мл)

REF

11565

Для профессионального использования в стоматологии. Произведено в Швейцарии.