

Описание продукта

Композитный герметик PermaSeal™ - это светоотверждаемая ненаполненная смола на основе метакрилата, предназначенная для отверждения в виде очень тонкой пленки с одним из самых тонких из известных слоев, ингибирующих кислород. Используется для герметизации новых или существующих композитных или временных реставраций. Перед использованием внимательно прочитайте и уясните инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.

Форма поставки

- Шприц для доставки объемом 1,0 мл
- Насадки-дозаторы:
Насадка Black Micro™ FX™

Показания к применению/назначение

Герметик PermaSeal проникает в трещины и герметизирует их и пористость поверхностного слоя в композитных реставрациях. Обработка и полировка композита приводит к появлению микроскопических дефектов на поверхности, что приводит к ускоренной потере композита, что клинически интерпретируется как износ. Герметик PermaSeal, применяемый во время установки реставрации и ежегодно, может улучшить краевую целостность композитных реставраций за счет заполнения микроскопических трещин на композитных поверхностях.

Противопоказания

- Не используйте препараты для лечения пациентов с известной повышенной чувствительностью к акрилатам и другим смолам. При развитии аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
- Для пациентов или пользователей, имеющих проблемы с аллергией, см. документ о присутствующих в продукте аллергенах, доступный на веб-сайте www.ultradent.com. При возникновении аллергической реакции тщательно промойте область вмешательства водой и попросите пациента проконсультироваться с его лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности

- Смолы могут повышать чувствительность.
- Следите за тем, чтобы не склеивать соседние реставрации.
- Не забудьте обеспечить надлежащую изоляцию перед использованием герметика PermaSeal. Чистое и сухое поле является обязательным условием для оптимального связывания смолы.
- Для сушки после травления используйте воздух, не содержащий масла и влаги.
- Насадки предназначены только для одноразового использования.
- Используйте только рекомендованные насадки.

Пошаговые инструкции

Подготовка

- 1) Снимите люэровский наконечник со шприца.
- 2) Прикрепите рекомендуемый наконечник для доставки к шприцу.
- 3) Перед внутриротовым использованием проверьте текучесть, цвет и консистенцию. Если чувствуется сопротивление, замените наконечник и попробуйте снова.
- 4) Изолируйте герметизируемый зуб или зубы.

Использование - Новые реставрации

- 1) Контурная композитная реставрация, финишная обработка и полировка до желаемой текстуры поверхности. При необходимости отрегулируйте окклюзию.
- 2) Очистите реставрацию и удалите следы индикаторной среды. Протравите все герметизируемые композитные поверхности и прилегающие поверхности зубов в течение 5 секунд с помощью 35%-ной фосфорной кислоты, затем промойте и тщательно высушите.
- 3) Нанесите тонкий слой герметика PermaSeal на поверхность композита и прилегающую эмаль. Осторожно истончите воздухом. Отвердите герметик PermaSeal в течение 10 секунд.
- 4) Оцените прикус и при необходимости откорректируйте.

Использование - ранее

установленные реставрации

- 1) Тщательно очистите поверхности и края, которые будут герметизироваться, суспензией Consepsis™ Scrub, аппаратом для микропротравки или освежите бором, и тщательно промойте.
- 2) Протравите эмаль, непосредственно прилегающую к реставрации, и все доступные композитные поверхности 35%-ной фосфорной кислотой в течение 15 секунд. Если этот шаг не выполнен, протравите эмаль в течение 30 секунд.
- 3) Выполните шаги с 3 по 5 раздела «Новые реставрации» для герметизации.

Надлежащее обращение

Во избежание перекрестного загрязнения протирайте шприц между применениями дезинфицирующим средством средней активности и используйте одноразовые защитные чехлы. Если защитные чехлы не используются, шприцы следует рассматривать как одноразовые.

Хранение и утилизация

Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.

Прочая информация

Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200



Медицинское
воздействие



Импортер



Только для профессионального
использования

PermaSeal™
Composite Sealer



Manufactured by:
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Manufactured in the USA from globally sourced materials



Ultradent Products GmbH
Am Westhove Berg 30
51149 Cologne Germany
Australian Sponsor:
Ultradent Australia Pty Ltd
16/1 Market St, Sydney, NSW 2000
1800 29 09 29 | www.ultradent.com.au



800.552.5512 | www.ultradent.com
© 2023 Ultradent Products, Inc., All Rights Reserved. 01019A03 02233