

РУКОВОДСТВО ПО ПОРОШКУ EMS

► EMS является единственной компанией, имеющей собственное производство порошков с двумя химическими лабораториями в Германии и Швейцарии. На основании 30 лет исследований, клинических испытаний, научных исследований и сотен миллионов вылеченных пациентов EMS рекомендует следующие 2 порошка для большинства клинических случаев.

РЕКОМЕНДОВАНО



ДРУГИЕ ПОРОШКИ EMS

Наименование	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65МКМ	SOFT	PERIO	
Код	DV-082	DV-048/*	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070	
Аромат	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	ЛИМОН/ЛЕМ МЯТА/MIN ВИШНЯ/СНЕ НЕЙТРАЛЬНЫЙ/NEU	ЛИМОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	НЕЙТРАЛЬНЫЙ	
Состав	ЭРИТРИТОЛ	БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	БИКАРБОНАТ НАТРИЯ	ГЛИЦИН	ГЛИЦИН	
Размер частицы	~14 мкм	~40 мкм	~65 мкм	~65 мкм	~25 мкм	
рН	~7	~8,1	~8,1	~6	~6	
Зуб	Пигментированный налёт и слабоминерализованные зубные отложения	✓	✓	✓	✗	
	Эмаль	✓	✓	✓	✓	
	Пятна эмали	✓	✗	✗	✗	✓
Десна	Дентин	✓	✗	✗	✓	
	Десна	✓	✗	✗	✓	
	Язык и нёбо	✓	✗	✗	✗	✓
Пломба	Гибридный композит	✓	✗	✗	✓	
	Стеклоиономер	✓	✗	✗	✗	✓
Имплантат	Имплантат и мукозит	✓	✗	✗	✗	✓
Ортодонтические конструкции	Брекеты и скобки	✓	✗	✗	✗	✓

⚠ Не направляйте напрямую струю порошка AIRFLOW® CLASSIC Comfort на пятна эмали и заполнения, коронки и мосты, так как это может повредить их. Мы рекомендуем использовать порошок AIRFLOW® PLUS вместо порошков AIRFLOW® PERIO и AIRFLOW® SOFT на основе глицина из-за его высокой эффективности, максимального комфорта и минимальной абразивности. Низкоабразивный порошок AIRFLOW® PLUS также максимизирует срок службы аппарата.