

Opacal

Паста на основе гидрохлорида кальция

Рентгеноконтрастная паста на основе гидрохлорида кальция для временного пломбирования корневого канала.

Состав

Гидрохлорид кальция 30 %, сульфат бария 24 %, наполнитель.

Свойства

Opacal — это рентгеноконтрастная кремообразная готовая к употреблению паста на основе гидрохлорида кальция с pH выше 12. Доставка пасты в корневой канал обеспечивается специальным аппликационным наконечником.

Показания

Временное пломбирование корневого канала в рамках эндодонтической терапии.

Указания по применению

- Тщательно обработайте, очистите и высушите корневой канал.
- Подготовьте шприц, соединив держатель с упором для пальцев.
- Снимите колпачок со шприца и установите новый аппликационный наконечник на люэровский соединитель.
- Заполните канал пастой Opacal от апикальной части корня. Используйте закрытый кончик и не доходите не менее 2 мм до верхушки.
- Заполните полость временным пломбировочным материалом для герметичного закрытия полости до следующего сеанса во избежание загрязнения системы корневых каналов.
- Проверьте качество пломбирования с помощью рентгенографии.
- Выбросьте аппликационный наконечник и сразу же закройте шприц ранее снятым колпачком во избежание засыхания пасты Opacal в шприце. Проздезинфицируйте шприц.
- Полностью удалите пасту на следующем приеме. Паста Opacal легко удаляется с помощью эндодонтического файла и нескольких капель физиологического раствора.

Меры предосторожности

Используйте закрытый наконечник и не доходите не менее 2 мм до верхушки, чтобы ограничить риск апикальной экструзии. Скорректируйте объем пасты в апикальной области в соответствии с анатомической формой канала, чтобы предотвратить риск переполнения.

Каждый аппликационный наконечник является одноразовым. Выбрасывайте его после каждой процедуры и используйте новый наконечник для каждого пациента.

Дезинфицируйте шприц для каждого пациента во избежание возможного перекрестного заражения.

Проверяйте подачу пасты из шприца путем выдавливания небольшого количества на бумагу для замешивания перед использованием интраорально с помощью наконечника. Не надавливайте на поршень шприца слишком сильно во избежание неконтролируемого разбрызгивания продукта в полость рта. В случае непроходимости аппликационного наконечника выбросьте его и используйте новый наконечник.

Максимальная продолжительность использования для временного пломбирования корневого канала должна составлять 30 дней.

Противопоказания

При использовании по назначению известные или прогнозируемые нежелательные эффекты отсутствуют.

Предупреждение

Этот продукт изготовлен из гидрохлорида кальция, который при попадании на кожу вызывает раздражение, а также может вызвать серьезное повреждение глаз. Избегайте попадания в глаза, на слизистую оболочку полости рта и кожу, чтобы предотвратить возможное раздражение или травму. В соответствии с передовой клинической практикой рекомендуется использовать коффердам, а также надеть на пациента защитные очки и водонепроницаемый нагрудник. Лечащие врачи должны носить защитные перчатки, средства защиты рта и носа и защитные очки.

При попадании на кожу или слизистую оболочку полости рта немедленно удалите продукт с ткани и тщательно промойте водой. При появлении раздражения кожи или слизистой оболочки обратитесь за медицинской консультацией или помощью.

При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды в течение нескольких минут, держа веко открытым. Немедленно обратитесь к врачу.

При проглатывании промойте рот водой и выпейте большое количество воды. Обратитесь за медицинской консультацией или помощью. Обеспечьте пострадавшему покой. Не вызывайте рвоту.

Хранение

Хранить при комнатной температуре от 15 °C до 25 °C в защищенном от прямого света месте.

Срок годности

3 года. Не используйте продукт после истечения срока годности.

Утилизация

Утилизируйте каждый наконечник и полностью использованный шприц в соответствии с правилами, принятыми в учреждении.

Упаковка

APC

Описание

1 шприц объемом 3 мл + 10 одноразовых аппликационных наконечников + 1 держатель	11020
<i>Дополнительные наконечники</i>	
<i>можно заказать по специальному артикулу:</i>	
10 одноразовых аппликационных наконечников	11022

Для профессионального применения в стоматологии. Изготовлено в Швейцарии