

MicroMega

# 2Shape

Two files to shape



**T.Wire**  
technology




# 2Shape


Иновация

**T.Wire**  
technology

TS1

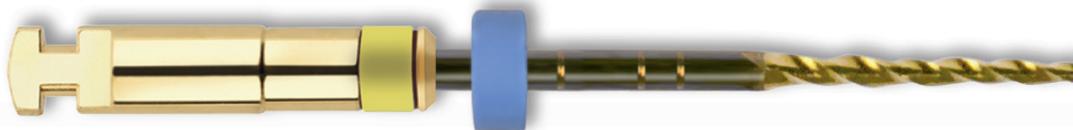


TS2

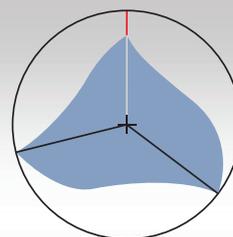


Иновация

Новое  
асимметричное  
сечение

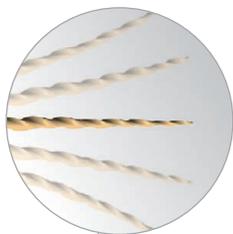


- Выше устойчивость к циклической усталости
- Более гибкие

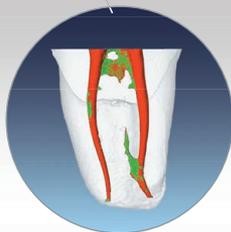

Сохраняют начальную анатомию корневых каналов

# Простое эндодонтическое лечение

**Интуитивная последовательность из двух инструментов.**

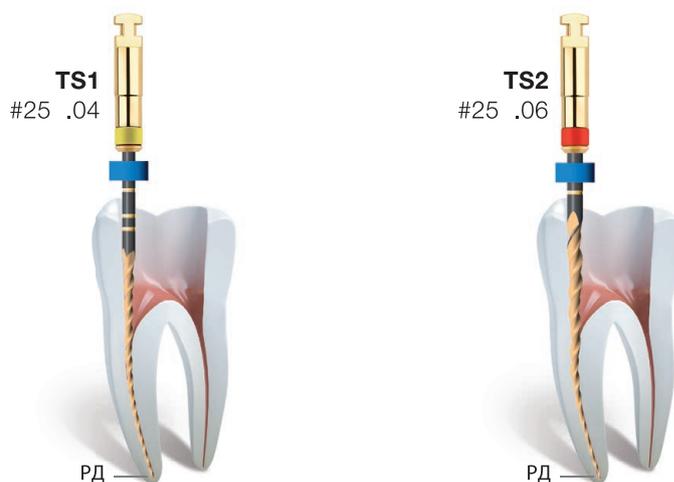

## **Движение инструментов TS1 и TS2 в корневых каналах**

- Поступательное движение в три волны (3 движения вверх-вниз) с восходящим круговым скребущим движением.
- Вводите вращающийся инструмент в корневой канал до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Когда почувствуете сопротивление, выполните круговое движение щеткой, чтобы устранить основные ограничения. Извлеките файл из корневого канала, очистите бороздки и промойте корневой канал. Затем продолжайте поступательные движения вниз.

2Share подходят практически для любого клинического случая\*.

\*кроме редких анатомических особенностей

РД: рабочая длина

# Безопасное эндодонтическое лечение

## Инновации

Предварительная высокотемпературная обработка

✓ **Выше устойчивость инструментов к переломам**

**T.Wire**  
technology


2Shape  
без высокотемпературной обработки

2Shape  
с высокотемпературной обработкой

до  
**40%\***

выше устойчивость  
к циклической  
усталости

✓ **Более гибкие**

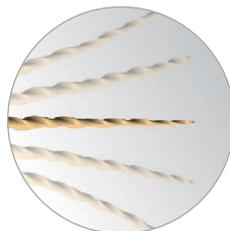

**T.Wire**

- Лучше работают в сильно искривлённых корневых каналах.
- Сохранили гибкость никель–титанового сплава.

\* данные исследований разработчика

# Эффективное эндодонтическое лечение


Micro-Mega представляет новое поколение треугольного асимметричного сечения: превосходный баланс между режущей эффективностью и удалением опилок из канала

## Инновации

### Новое асимметричное треугольное сечение

#### 2 основных лезвия

- Для режущей эффективности

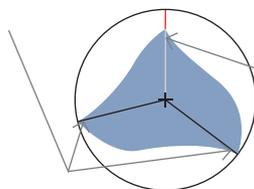

#### 1 дополнительное лезвие

- Для удаления опилок
- Для снижения нагрузки на инструмент



#### Асимметричное сечение:

- Снижает риск перелома инструмента<sup>1</sup>
- Повышает эффективность очистки стенок корневых каналов выметающими движениями<sup>2</sup>



#### Удаление опилок

2Shape обеспечивают лучшее выведение опилок коронарно, благодаря дополнительному лезвию

**Сохраняет начальную анатомию  
и эффективно очищает стенки корневых каналов**



Моляр нижней челюсти.  
Медиальные каналы обработаны  
2Shape (TS1 и TS2)



**Библиография**

1. Effect of Asymmetry on the Behavior of Prototype Rotary Triple Helix Root Canal Instruments.  
Franck Diemer, Jérôme Michetti, Jean-Philippe Mallet and Robert Piquet.  
J Endod – 2013

2. The Influence of Brushing Motion on the Cutting Behavior of 3 Reciprocating Files in Oval-shaped Canals.  
Shereen Alattar, DDS, DESE, Walid Nehme, DCD, DESE, Franck Diemer, DDS, MS, PhD, and Alfred Naaman,  
DDS, MSc, PhD.  
J Endod – 2015 May

## Клинические случаи

**Алексей Болячин.** КМН, врач-стоматолог, главный редактор журнала «Эндодонтия»



Для меня важно чтобы система была понятна, проста и надежна. 2Share идеально подходит для решения значительной части клинических задач.

**Биштова Ирина.** Врач-стоматолог, Москва



В работе с 2Share всё просто, быстро, четко и перерасширение к/к отсутствует!


# Клинические случаи

**Афанютин Андрей.** Врач-стоматолог, Орёл



2Share – инструменты, гармонично сочетающие в себе прочность и гибкость, полностью реализовали идею быстрой и эффективной повседневной эндодонтии. Высокая режущая эффективность, беспрецедентная способность к эвакуации опилок сокращают время работы при всегда качественной очистке канала

**Коба Святослав.** Врач-стоматолог, Москва

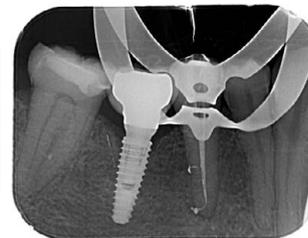

2Share – это те инструменты, о которых давно мечтали мои руки. Эффективность, скорость и результат – вот три основы моей эндодонтической практики, а 2Share прокачали эти основы по максимуму

# Клинические случаи

**Миловидов Александр.** Врач-стоматолог, Иркутск



Благодаря прочности, надежности и качеству, инструменты 2Share позволяют быстро и качественно обработать даже облитерированные корневые каналы, сохраняя их истинное местоположение

**Островский Александр.** КМН, врач-стоматолог, Москва



Система 2Share одна из лучших систем на сегодняшний день. Дизайн инструмента позволяет минимизировать искажение анатомии и способствует эффективному выведению дебриса

## Для завершения обработки корневых каналов

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

**F35**  
#35 .06

- Широкие корневые каналы
- Прямые корневые каналы



РД

**F40**  
#40 .04

- Узкие корневые каналы
- Искривлённые корневые каналы



РД

ИЛИ

**Апикальные файлы**

**Micro-Mega SA** 12, rue du Tunnel, 25000 BESANCON / France, T +33 3 81 54 42 42, F +33 3 81 54 42 30, commercial@micro-mega.com

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ MICRO-MEGA В РОССИИ**

123182, Москва, ул. Щукинская, 2, тел./факс: (495) 780-5245/46

бесплатный многоканальный телефон: 8-800-333-0646

[www.stident.ru](http://www.stident.ru), [mail@stident.ru](mailto:mail@stident.ru)

**S.T.I.**  
DENT®